

第36回全日本学生ライフセービング選手権大会における PCR検査キット申込受付について

- 第36回全日本学生ライフセービング選手権大会に参加する全ての関係者は、**大会前のPCR検査を義務づけます。**検査結果が「陰性」である場合のみ、会場への来訪ならびに競技会場への入場が認められます。
- 原則として主催者が指定する検査キットを使用してください。検査キット受け取り後、各自で検体を採取し、検査センターへ送り返していただく必要があります。
- PCR検査キットの代金と参加者各位への配送料は主催者が負担いたします。ただし、各自検体を採取し、検査センターへ送り返す送料（参考：ゆうパケット利用 360円）は各自負担となります。主催者が代金等を負担する対象者は次の通りです。
 - ・エントリー選手
 - ・テクニカルオフィシャル
 - ・大会運営スタッフ※チーム帯同の引率者は主催者負担の対象外となります。各自/各チームのご負担で検査手配をお願いいたします。
- 各チームのエントリー担当者は、チームの出場選手全員（もしくはチーム代表者のみ）の検査キット受取先住所情報を集約し、JLA事務局まで住所リストを送付してください。期日までに提出が無い、住所不備により検査キットが届かない、検体の発送が遅れて検査結果が届かない、等のトラブルは、主催者では責任を負えません。必ず期日を守っていただくよう、お願い申し上げます。期日に間に合わず指定の検査キットが使用できない場合は、任意の検査方法による検査結果でも構いません。この場合の費用は各自の自己負担となります。
※集約した住所などの個人情報、本検査キットの発送以外の目的には一切使用いたしません。
- **住所リストの提出期日・提出先【厳守！】** **2021年9月23日(木祝) 23時59分まで**

宛先：日本ライフセービング協会 事務局
担当 水川雅司 mizukawa@jla.gr.jp

《2021年9月～10月》

日	月	火	水	木	金	土	
			1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
					開催可否の判断②		
19	20	21	22	23	24	25	
(1)PCR検査キット申込受付						(2)PCR検査キット発送	
					開催可否の判断③		
26	27	28	29	30	1	2	
	(3)検体採取・検査センターへ各自発送 27(月)～28(火)午前中までに発送完了すること			(4)検査結果 ※検体到着日の翌日までに通知		全日本学生 御宿 Day.1	
3	(1)各チームから住所等名簿を集約 (2)名簿を元に検査キットを発送 (3)各自が検体を採取し検査センターへ発送する (4)検査結果が各自にメールで届く ※(1)～(4)いずれも期日は必ず守ってください。期日に間に合わず指定の検査キットが使用できない場合は、任意の検査方法による検査結果でも構いません。この場合の費用は各自の自己負担となります。						
全日本学生 御宿 Day.2							

検査キット写真1

内容物



キット内容物

A ご案内(本紙)

B 唾液採取容器(1次容器)

C 不活化液

D バーコードシール(3枚)

①本紙に貼り付け(ご本人控用)
②唾液採取容器に貼り付け
③返送専用箱に貼り付け

E 給水マット

F バイオパウチ(2次容器)


G 輪ゴム

H 返送専用箱(3次容器)

I セキュリティシール

J ゆうパケット伝票シール

※各内容物のイラストはイメージです。実際とは異なる場合があります。

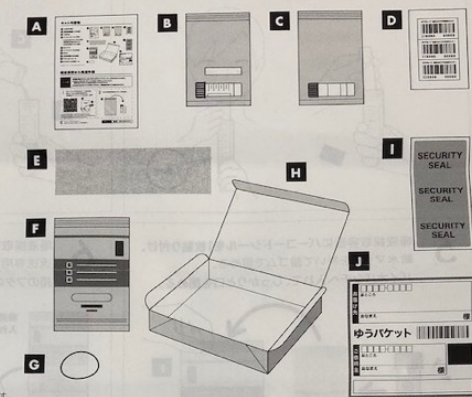


唾液採取から発送手順

注意


- 唾液採取前30分は、飲食・喫煙・歯磨き(マウスウォッシュ)は行わないでください。
- 唾液は、容器の赤い線(1.5ml目盛)を目安に入れてください。唾液の量が少ないと、検査が出来ないことがあります。
- 唾液採取後は速やかに発送してください。検査精度が低下する場合があります。

1 スマートフォンで下記のQRコードを読み取り、専用フォームから必要事項を登録する。本紙裏面にバーコードシールを1枚貼る。(控用)



※読み取りができない場合は、お手数ですが下記URLをご入力ください
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScukzjLCFVaYBEHkyJfUWe9YzWRA5HUXThztS9wbPk-VVwQ/viewform>

2 袋から唾液採取容器とストローを取り出す。

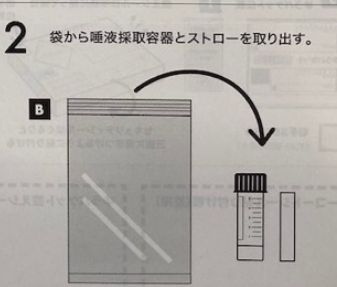

ご案内 **表面** 裏面もご確認ください

3 唾液採取容器の蓋を開け、ストローを使って唾液を採取。(1.5ml目盛目安)



4 唾液採取容器に不活化液を入れ、蓋をしっかりと閉める。



5 唾液採取容器にバーコードシールを1枚貼り付け、給水マットを巻いて輪ゴムで留める。バイオパウチへ入れて、しっかりと口を閉める。



6 唾液採取容器を入れたバイオパウチを返送専用箱に入れる。箱のフタの右側余白に、バーコードシールを貼る。



7 「ゆうパケット伝票」に記入、箱に貼り付けて、控えシールは剥がす。セキュリティシールで封をして、ポストへ投函、または郵便局から発送。
※ゆうパケット送料360円をご負担いただきます。360円分の切手貼り付けでポストへの投函が可能です。



切手360円分(ポスト投函の場合)

箱に封をする前にもう一度確認

- バーコードシールの貼り忘れはないか ※1枚は本紙に貼って保管
- バイオパウチの口は閉まっているか
- QRコードから必要事項を登録したか
- ゆうパケット伝票に記入漏れがないか
- ゆうパケット伝票の控えシールは剥がしたか ※本紙に貼って保管

ゆうパケット送付先

〒210-0804 神奈川県川崎市川崎区藤崎3-6-1
医療法人社団和光会
キノメディッククリニック川崎

バーコードシール貼り付け欄(控用)

ゆうパケット控えシール貼り付け欄

ご案内 **裏面**